

Zawartość- dot. 108890

- 1 zamykana torebka do ochrony próbki (Torebka A),
- 1 przezroczysta probówka z zieloną nakrętką zawierająca płyn (Apafix™),
- 1 zielona część z łyżeczką

Instrukcja użycia:

1



a) Pobierz próbkę kału do czystego, suchego pojemnika (np. do basenu, plastikowego woreczka lub opakowania), który nie ma pozostałości mydła lub środków dezynfekujących.

b) **Nie należy stosować próbek kału, które zostały zanieczyszczone wodą, moczem lub papierem toaletowym.**

2



Odkręć pokrywkę probówki zawierającej płyn i umieść ją na płaskiej powierzchni, tak aby nie można było jej przewrócić.

Otwórz nakrętkę.

3



a) Weź zielono-przezroczysty zestaw do pobierania próbki, trzymając mniejszą tubę za stożkową końcówkę.

b) Użyj zielonego czerpaka, aby pobrać:

kał płynny: trzy poziomy czerpaka
kał stały: jeden czubaty czerpak stolca (zobacz poniższy przykład).

Próbka ze środka stolca

 X3

Stolec płynny

 X1

Solid stool

Stolec stały

Czubaty czerpak x1

4



a) Umieść łyżeczkę zawierającą próbkę kału w probówce z płynem (nie oddzielaj załączonej łyżeczki od reszty).

b) Zakręć tak **mocno, jak to możliwe; poczujesz "kliknięcie"**, które jest gwarancją uszczelnienia. Pozostaw złączone, tak jak pokazano na rysunku obok.

c) Wypełnij informacje dotyczące pacjenta na dołączonej luzem etykiecie i przymocuj ją do górnej, stożkowej części tuby.

d) Wypełnij informacje dotyczące pacjenta na etykiecie tuby.

e) Umieść zakręconą tubę w torebce A. Przechowuj w temperaturze pokojowej, nie schładzaj.



5

Umyj dokładnie ręce wodą z mydłem.

W razie potrzeby pobrania dodatkowych próbek kału w inne dni przestrzegaj wskazówek lekarza i powtórz kroki 1-5 w celu pobrania dodatkowych próbek za pomocą nowego pakietu higienicznego.

Oddaj próbki(próbkę) do laboratorium lub placówki służby zdrowia zgodnie z Instrukcją.

APACOR

Instrukcja pobrania próbki

APACOR

UNIT 5, SAPPHIRE CENTRE
FISHPONDS ROAD, WOKINGHAM
BERKSHIRE, RG41 2QL,
WIELKA BRYTANIA
TEL: +44 (0)118 979 5566
FAX: +44 (0)118 979 5186

IVD

CE

Ⓢ